


- ۱- کلید روشن و خاموش (On/Off)
- ۲- کلید تغییر لیدها در حالت Manual و Auto و Rhythm به شکل دستی.
- ۳- در صورت خارج شدن سیگنالها از صفحه نمایش از کلید Reset استفاده کنید.
- ۴- گین های قابل انتخاب Auto ، 20mm/mv ، 10 ، 5 ، 2/5 (Sense) می باشد.  
(بهترین حالت ۱۰ می باشد)
- ۵- سرعتهای قابل انتخاب برای انجام رکوردگیری 25 ، 12/5 ، 6/25 و 50mm/s (Speed) می باشد.  
(بهترین حالت 25mm/s می باشد)
- ۶- منوی تنظیمات دستگاه (Menu)
- ۷- کلید تایید در منو تنظیمات (Enter)
- ۸- کلیدهای حرکت در منو (به سمت چپ و راست و بالا و پایین)
- ۹- شروع و پایان گرفتن نوار (Start/Stop)
- ۱۰- نمایشگر باتری (در صورت سبز بودن، شارژ کامل و در صورت نارنجی بودن باید شارژ گردد).  
زمان شارژ کامل ۳ ساعت می باشد.
- ۱۱- جهت افزایش عمر باتری و عملکرد صحیح دستگاه بعد از سبز شدن چراغ باتری، دستگاه را از شارژ خارج نمایید.

آدرس: تهران، خیابان آفریقا، بین چهارراه جهان کودک و پل میرداماد، برج نگین، طبقه ششم، واحد ۶۰۷

فکس: ۰۲۱-۸۸۸۸۰۶۷۹      تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۸۰۵۰۷ ، ۰۲۱-۸۸۷۷۲۰۴۴ ، ۰۲۱-۸۸۷۷۲۰۱۲

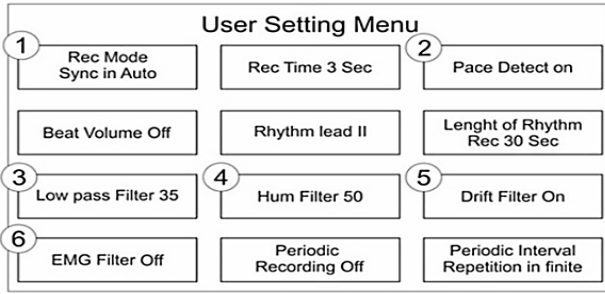

توجه: جهت داشتن ECG مطلوب، تنظیمات منوی User Setting با تصویر بالا مطابقت داشته باشد.

#### توصیه های مهم:

- ۱- به صورت روزانه سلامت ظاهری اکسسوری ها را چک کنید.
- ۲- به هیچ وجه از الکترودهای سولفاته شده استفاده نکنید.
- ۳- مسیر کابل ECG را از کابل برق جدا کنید.
- ۴- از اعمال فشار، کشش یا هر گونه نیروی مکانیکی به کابل پرهیز کنید.
- ۵- در صورت عدم وجود ارت مناسب در مرکز درمانی خود، کابل برق را از سیستم جدا کرده و از باتری استفاده کنید.
- ۶- از تمیز بودن پوست بیمار اطمینان حاصل کنید.
- ۷- عصبی و مضطرب بودن بیمار تاثیر منفی در نتیجه کار خواهد داشت.
- ۸- الکترودها را روی بخش استخوانی بدن قرار ندهید.
- ۹- از ژل به میزان کافی استفاده کنید.
- ۱۰- در صورت وجود نویز علی رغم به کارگیری کلیه توصیه های فوق، از فیلترهای دستگاه استفاده کنید. حتماً پیش از استفاده از فیلترها، راهنمای کاربری مطالعه شود (شماره ۳ و ۴ و ۶).
- ۱۱- از فیلتر Drift برای حذف نوسانات خط مرجع سیگنال استفاده کنید (شماره ۵). در بعضی شرایط ممکن است این فیلتر باعث تغییر در ST Segment شود
- ۱۲- برای حذف نویزهای فرکانس بالا و ماهیچه ای از فیلتر EMG Filter استفاده کنید (شماره ۶). در صورت استفاده از این فیلتر، فرکانس فیلتر پایین گذر را حتماً روی **150Hz** تنظیم نمایید.
- ۱۳- برای رکوردگیری مطلوب و تمیز نگه داشتن هد پرینتر از کاغذ مرغوب استفاده نمایید.
- ۱۴- گره خوردن و پیچ خوردن کابل ECG باعث ایجاد نویز در ECG می شود.
- ۱۵- استفاده توامان از فیلترهای 25Hz یا 35Hz با EMG ممکن است در بعضی شرایط منجر به تغییر در امواج سیگنال ECG گردد. توصیه می شود که حتی المقدور در کارهای تشخیصی از این فیلترها به صورت همزمان استفاده نشود.
- ۱۶- در صورت بروز هرگونه مشکل قبل از ارسال دستگاه برای تعمیر با واحد خدمات پس از فروش هماهنگ نمایید.

آدرس: تهران، خیابان آفریقا، بین چهارراه جهان کودک و پل میرداماد، برج نگین، طبقه ششم، واحد ۶۰۷

فکس: ۰۲۱-۸۸۸۸۰۶۷۹      تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۸۰۵۰۷-۱۲-۸۸۷۷۲۰۴۴-۸۸۷۷۲۰۲۱